

ИНСТРУКЦИЯ № 03/15

по применению дезинфицирующего средства “Дезитабс”
(ООО “Дезнэт”, Россия)

Инструкция разработана: ФБУН “Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии” Роспотребнадзора (ФБУН “ГНЦ ПМБ” Роспотребнадзора); ИЛЦ ФБУН “Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии” Роспотребнадзора (ИЛЦ ФБУН “ЦНИИ Эпидемиологии” Роспотребнадзора); Испытательным лабораторным центром ФГБУ “Научно-исследовательский институт вирусологии им. Д.И. Ивановского” Министерства Здравоохранения Российской Федерации (ИЛЦ ФГБУ “НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского” Минздрава России); ООО “Дезнэт” (Россия).

Авторы: Герасимов В.Н., Гайтрафимова А.Р., Быстрова Е.В., Храмов М.В. (ФБУН “ГНЦ ПМБ” Роспотребнадзора); Чекалина К.И., Минаева Н.З. (ИЛЦ ФБУН “ЦНИИ Эпидемиологии” Роспотребнадзора); Носик Н.Н., Носик Д.Н. (ИЛЦ ФГБУ “НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского” Минздрава России); Шанин А.А., Ланге Д.С. (ООО “Дезнэт”, Россия).

Инструкция предназначена для персонала медицинских, лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и организаций (ЛПО) различного профиля, в т.ч. акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, соматических отделений, хирургических, педиатрических учреждений, клинических, бактериологических, вирусологических, паразитологических ПЦР и других лабораторий, противотуберкулезных, патологоанатомических отделений, кожно-венерологических и инфекционных отделений, отделений переливания крови, детских и взрослых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой медицинской помощи и т.д.; персонала учреждений социального обеспечения и социальной защиты, санпропускников, пенитенциарных учреждений; служащих учреждений МО, ГО и МЧС; работников детских (школьных и дошкольных) учреждений, учреждений образования, культуры, отдыха и спорта, объектов коммунально-бытовой сферы, предприятий общественного питания и торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, персонала объектов санаторно-курортного хозяйства, фармацевтической промышленности, аптек и аптечных организаций, для работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство “Дезитабс” (далее по тексту – средство) содержит в качестве действующего вещества (ДВ) не менее 84% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (*Na-ДХИЦК*, CAS номер: 2893-78-9) и специальные функциональные добавки. Средство представляет собой *таблетки* круглой формы и мелкие, свободно высыпавшиеся и не связанные друг с другом, *гранулы* белого цвета (допускаются оттенки) с характерным запахом хлора.

Таблетки выпускаются массой (1,00 ± 0,10) г и (3,40 ± 0,20) г. При растворении 1 *таблетки* выделяется (0,45 ± 0,10) г и (1,50 ± 0,20) г активного хлора (АХ) соответственно. Массовая доля активного хлора (АХ) в *таблетках* – (45,0 ± 5,0)%, *гранулах* – (55,0 ± 5,0)%.

1.2. Средство в виде *таблеток* и *гранул* расфасовано в полимерные банки с плотно закрывающимися крышками вместимостью (0,3 – 1) кг, полимерные контейнеры вместимостью (1 – 5) кг и полимерные бочки вместимостью (5 – 75) кг. Также средство в виде *таблеток* расфасовано в контурную ячейковую упаковку (блистер), контурную безъячейковую упаковку (стрип) вместимостью (10 – 100) *таблеток*.

По согласованию с потребителем допускается другая фасовка, при условии обеспечения сохранности упакованной продукции, исключения возможности намокания средства и загрязнения средством окружающей среды при его хранении и транспортировке.

1.3. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения составляет 60 месяцев (5 лет). Срок годности рабочих растворов средства – не более 7 суток при условии их хранения в закрытых непрозрачных емкостях в прохладном темном месте.